


SISTEMA ANTI FUGAS CON PULSERAS ACTIVAS

@!ert!


- **Errante:** Paciente que transita libremente por un edificio o espacio controlado.
- **RFID:** (Radio Frecuencia Identificación) Dispositivo que proporciona un código único por radio frecuencia.
- **Tag Activo:** Dispositivo RFID de altas prestaciones con alimentación.
- **Antena Activadora:** Elemento que “activa” TAGs Activos.
- **Central Receptora:** Equipo que recibe y gestiona los códigos de los TAGs.
- **Contacto de Puerta:** Sensor que detecta el estado de la puerta.
- **Wireless:** Sistema que funciona vía radio sin necesidad de cableado.
- **ON-Line:** Conectado a una Red o Bus .
- **Autónomo:** Funciona sin estar conectado a una Red o Bus.

AUTÓNOMO

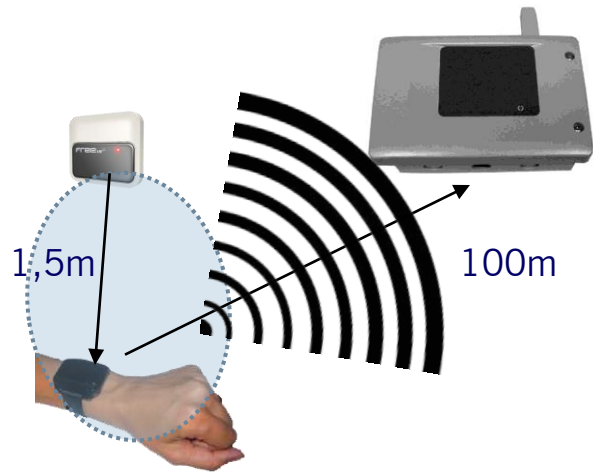


Alert Free-ACR

On-Line

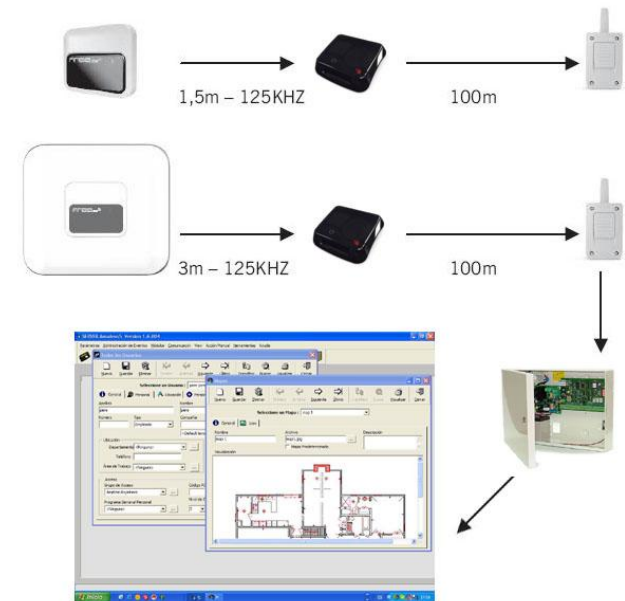

Alert On Line-ACR

AUTÓNOMO

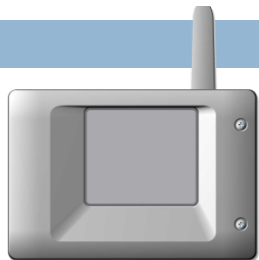

ALERT Free-ACR

Central de Control de Errantes Incluye central Access 500-ACR +sirena. Configurado y cableado listo para su funcionamiento. Ampliable hasta 4 Canales o puertas, memoria de 500 pulseras, tarjeta de eventos (Opcional), entrada para lectores de proximidad EVOPROX y dispositivos emisores de la gama MOTION.

Alimentación a 230V ac.



Free TH-ACR

Tag activo en versión Pulsera frecuencia de activación 125KHz y transmisión a 868MHz. Activación mediante dispositivos FreeR y recepción en dispositivos Activa Go-ACR, Connect-ACR y centrales Alert Free. Encapsulado en IP 67 permitiendo el baño.

Ideal para Control de Errantes, Posicionamiento de personas o Control de Rondas.



FREE 30R

Antena Activadora 125KHz para activación de pulseras Free TF y dispositivos FreeT. Radio de activación 3 m. Posibilidad de sincronizar hasta 4 activadores sincronizadas. Programación mediante pulsador frontal de 4 canales y 7 grupos 28 puntos de control. Alimentación 12V cc 95mA.



FREE 15R

Antena Activadora 125KHz para activación de pulseras Free TF y dispositivos FreeT. Radio de activación 1.5m. Posibilidad de sincronizar hasta 4 activadores sincronizadas. Programación mediante pulsador frontal de 4 canales y 7 grupos 28 puntos de control. Alimentación 12V cc 95mA.



ACTIVA GO-ACR

Antena Activa 868MHz para ampliación de distancias entre central Alert Free mediante cable de 3 hilos (+ - L) y distancias hasta 100m. Permite la configuración de Grupos en centrales Alert Free



Cierre de Seguridad

THCR-ACR Sistema de cierre de seguridad multiuso para correas de tela THT en bolsas de 10 unidades.

THDES-ACR. Imán desacoplador para retenedores de 16mm.

KIT AUTÓNOMO



KIT ALERT Free15-ACR

Kit de Control de Errantes 1,5m ideal para control en pasillos o puertas de ancho inferiores a 1,20m. Incluye central Access 500-ACR + Activador Free 15R + Pulsera Free TH-ACR +sirena. Configurado y cableado listo para su funcionamiento. Ampliable a 4 Canales, memoria de 500 pulseras, tarjeta de eventos (Opcional), entrada para lectores de proximidad EVOPROX y dispositivos emisores de la gama MOTION.

Alimentación a 230V ac.

Puede pedirse en versión **Free15R en Tapa**, donde la antena activadora va integrada en el panel frontal.




KIT ALERT Free30-ACR

Kit de Control de Errantes 3m ideal para control en pasillos o puertas de ancho inferiores a 3m. Incluye central Access 500-ACR + Activador Free 30R + Pulsera Free TH-ACR +sirena. Configurado y cableado listo para su funcionamiento. Ampliable a 4 Canales, memoria de 500 pulseras, tarjeta de eventos (Opcional), entrada para lectores de proximidad EVOPROX y dispositivos emisores de la gama MOTION.

Alimentación a 230V ac.

¿Cómo funciona Alert Free-ACR?

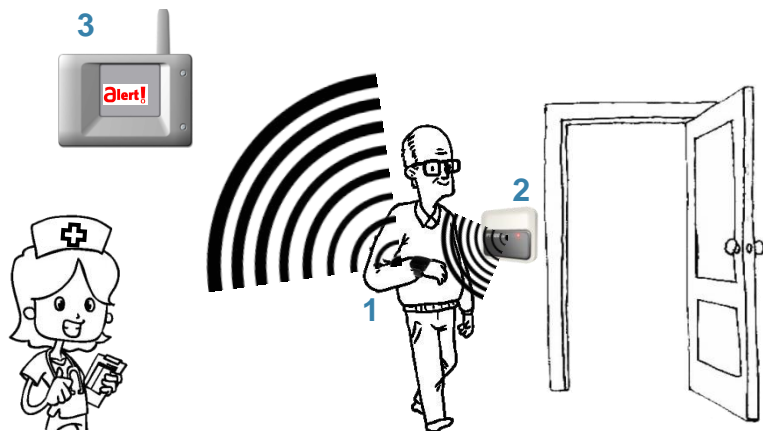

Ideal para Residencias Geriátricas con pacientes con demencias o Alzheimer.
 Permite controlar hasta 500 pulseras y 4 zonas o puertas por central.
 Con Activa Go-ACR ampliable a 7 centrales con 28 Zonas o puertas.
 Muy discreto y fiable.
 Con Contacto de puerta elimina las falsas alarmas de fuga.
 Económico y escalable.
 Con el mismo equipo podemos realizar un Control de Acceso.
 Con Software Assistant Free-ACR podemos gestionar Múltiples instalaciones


EJEMPLO

- 1-El Paciente con pulsera **Free TH-ACR**, se desplaza libremente.
- 2-Si se acerca a una puerta controlada por un **Free R-ACR**, este activa la pulsera **Free TH-ACR** que emite su código y posición hacia la central **Alert Free-ACR**.
- 3-Si la pulsera está memorizada dentro la Central **Alert Free-ACR** se genera una alarma a Enfermería.

VENTAJAS

- Pug and Play (En Versión Kit).
- Fácil Instalación.
- No requiere cableado entre Activador y Central.
- Mantenimiento mínimo.
- Pulsera estanca IP67 (Permite bañarse con ella)
- Alimentación Pulsera 3Vcc (Pila CR2032)
- Alimentación Central 230V AC, Activador 12V CC.
- Ampliable a nuevas necesidades.
- Múltiples Accesorios y Aplicaciones.

Alert Free-ACR con Puerta Controlada

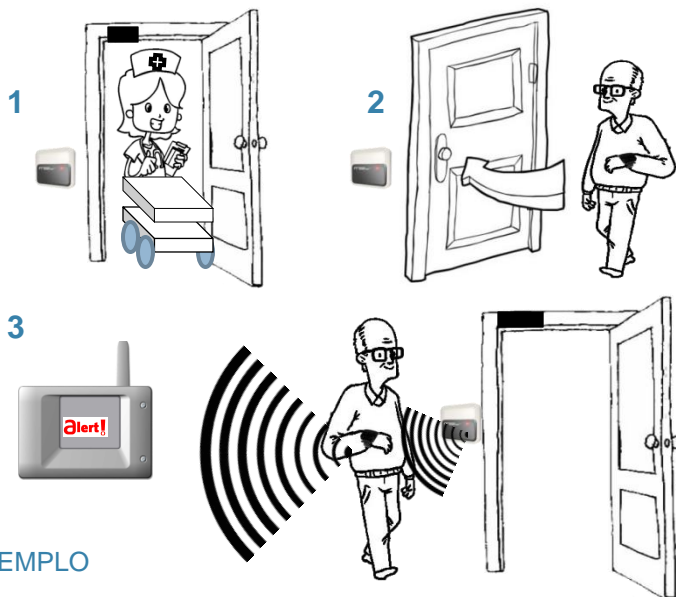

EJEMPLO

1-La puerta está desbloqueada para el paso de todas las personas.

2-Si se acerca un errante con pulsera, la puerta se bloquea y no permite la salida. Al no existir fuga, el sistema no genera ninguna alarma.

3-Si la puerta quedara abierta por algún motivo, la pulsera envía un aviso a la Central **Alert Free-ACR** que generará una alarma a Enfermería.

Ideal para Residencias Geriátricas con pacientes con demencias o Alzheimer.
 Permite controlar hasta 500 pulseras y 4 zonas o puertas por central.
 Con Activa Go-ACR ampliable a 7 centrales con 28 Zonas o puertas.
 Muy discreto y fiable.
 Alarmas reales de fuga (evita falsas alarmas)
 Con central con versión LB avisa de las pulseras con pila baja.
 Económico y escalable.
 Con el mismo equipo podemos realizar un Control de Acceso.
 Con Software Assistant Free-ACR podemos gestionar Múltiples instalaciones.

VENTAJAS

Pug and Play (En Versión Kit).
 Fácil Instalación.
 No requiere cableado entre Activador y Central.
 Mantenimiento mínimo.
 Pulsera IP67 (Permite bañarse con ella)
 Alimentación Pulsera 3Vcc (Pila CR2032)
 Alimentación Central 230V AC, Activador 12V CC.
 Ampliable a nuevas necesidades.
 Múltiples Accesorios y Aplicaciones.

On Line



ALERT On Line-ACR

Central Control de Errantes ON-LINE 4 zonas ideal para control de errantes en pasillos, puertas o zonas mediante antenas cativadoras FreeR. Incluye central TPL4-D4-ACR + Fuente Alimentación+ SAI. Memoria de 2000 pulseras, 2000 eventos en memoria, comunicación por RS 232, RS 485 o IP mediante adaptador (Opcional).

Puede pedirse en versión **Connect en Central**, donde el receptor CONNECT va integrado y cableado en el interior de la caja de la central.



Free TH-ACR

Tag activo en versión Pulsera frecuencia de activación 125KHz y transmisión a 868MHz. Activación mediante dispositivos FreeR y recepción en dispositivos Activa Go-ACR, Connect-ACR y centrales Alert Free. Encapsulado en IP 67 permitiendo el baño. Ideal para Control de Errantes, Posicionamiento de personas o Control de Rondas.



FREE 30R

Antena Activadora 125KHz para activación de pulseras Free TF y dispositivos FreeT. Radio de activación 3 m. Posibilidad de sincronizar hasta 4 activadores sincronizadas. Programación mediante pulsador frontal de 4 canales y 7 grupos 28 puntos de control. Alimentación 12V cc 95mA.



FREE 15R

Antena Activadora 125KHz para activación de pulseras Free TF y dispositivos FreeT. Radio de activación 1.5m. Posibilidad de sincronizar hasta 4 activadores sincronizadas. Programación mediante pulsador frontal de 4 canales y 7 grupos 28 puntos de control. Alimentación 12V cc 95mA.



CONNECT-ACR

Receptor 868MHz para ampliación de distancias entre central Line 2 mediante cable de 3 hilos (+ - L) y distancias hasta 100m. Permite la configuración de Grupos en centrales Alert On Line. Multi protocolo de salida Wiegand, Bus L, Controller 6000.



Cierre de Seguridad

THCR-ACR Sistema de cierre de seguridad multiuso para correas de tela THT en bolsas de 10 unidades.
THDES-ACR. Imán desacoplador para retenedores de 16mm.

¿ Cómo funciona Alert On Line-ACR?



Control en tiempo real de todos los pacientes con pulseras.
 Acciones y avisos programables
 Ideal para Residencias Geriátricas con pacientes con demencias o Alzheimer.
 Permite controlar miles de pulseras y 4 zonas o puertas por central.
 Ampliable a 7 centrales con 28 Zonas o puertas.
 Muy discreto y fiable.
 Con Contacto de puerta elimina las falsas alarmas de fuga.
 Con el mismo equipo podemos realizar todas las funcionalidades de Amadeus 5.

VENTAJAS

Visualización en tiempo real de pacientes (quién/donde)
 Fácil Instalación.
 No requiere cableado entre Activador y Central.
 Mantenimiento mínimo.
 Alimentación Central 230V AC, Activador 12V CC.
 Avisos por SMS, Mail,... a teléfonos o SmartPhones
 Registro de todos los eventos ocurridos
 Gestión de visitas (desactivación temporal de pulseras)
 Localización de personas (Último pase por...)
 Generación de informes manuales o de forma automática.
 Múltiples Accesorios y Aplicaciones.
 Integable o compatible con otros sistemas.

EJEMPLO

1-El Paciente con pulsera **Free TH-ACR**, se desplaza libremente.

2-Si se acerca a una puerta controlada por un **Free R-ACR**, este activa la pulsera **Free TH-ACR** que emite su código y posición hacia el receptor **Connect-ACR** que lo transfiere a la central **Alert On Line-ACR**

3-La pulsera se muestra en pantalla reportando quién es y en que puerta se encuentra y genera las alarmas y avisos a los Smart Phones de las personas responsables.



Software Assistant ACR

Gestión de instalaciones con centrales Alert Free. Incluye interface USB. Funciones principales: lectura de eventos, inserción/anulación código personalizado en tarjetas de memoria, emisores y receptores/centrales, creación de nuevas instalaciones y mantenimiento de éstas (reservas, modificaciones, listados de instalaciones, ...).



Software Amadeus5 Ligth

Versión Ligera de software para el control de acceso ON-LINE.

Para pequeñas instalaciones mediante centrales OPEN4. De 2.000 usuarios y un máximo de 16 lectores. Ampliable a todas las versiones de Amadeus 5.

CIENTOS DE INSTALACIONES EN TODA ESPAÑA

RESIDENCIA EL NADAL (STA CREU)
HOGAR PROVINCIAL (ALICANTE)
INST. ASSIST. SANITARIA (SALT GIRONA)
RESIDENCIA LAS BUGANVILLAS
RESIDENCIA TRES MAGNOLIAS
HOSPITAL PARC TAULÍ
CENTROS BALLE SOL
RESIDENCIA MIRANDA EBRO (BURGOS)
HOSPITAL ST. JUAN GRANDE (CADIZ)
RESIDENCIA LA CARITAT (OLOT)
HOSPITAL DE CAMPDEVANOL
RESIDENCIA PARC DEL SEGRE (LLEIDA)
RESIDENCIA PEDRA SERRADA
HOSPITAL ST JAUME

 Institut
d'Assistència
Sanitària

 **Parc Taulí**
Hospital Universitari

 **BALLE SOL**
Centros Residenciales 3ª Edad
★★★★★


Parc del Segre
residència i centre de dia

 **FUNDACIÓ
LA CARITAT**

 **CONSORCI
HOSPITALARI
DE VIC**



VER VIDEO



accesor

*Soluciones en control de
accesos y seguridad*

FIN

